




Quando se sentir doente, o melhor é você se consultar em algum Centro de Saúde
Atenção: se o teste for negativo não use coartem




1 Retire todo o material de dentro do kit e coloque na sua frente.

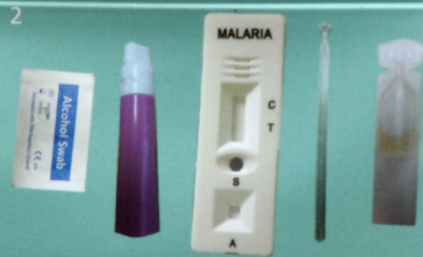


2 Coloque todos os itens que você vai usar sobre a mesa em ordem



3 remova a tampa da lanceta

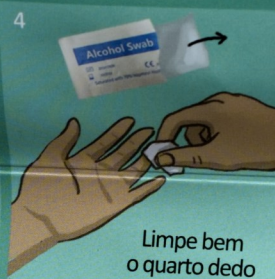

4 Limpe bem o quarto dedo com o álcool

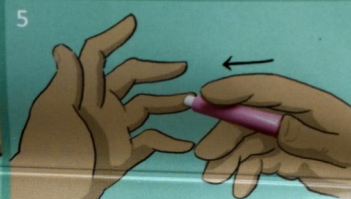


5 Aperta a lanceta para furar o dedo, ao soltar, a agulha volta por si só



6 Massageie o dedo até formar uma gota de sangue


E preciso formar uma gota com o sangue

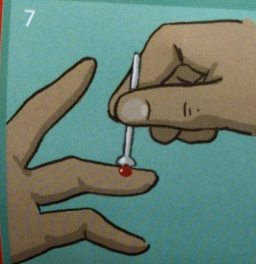

7 Pegue uma gota de sangue com a pipeta



8 Coloque a gota no poço marcado S

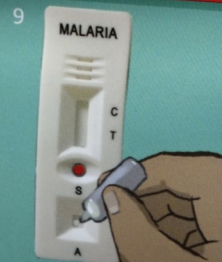

9 - Coloque 3 gotas do líquido no poço marcado A



10 Espere 20 minutos sobre uma superfície plana.



2 linhas = Positivo

Faça o tratamento contra a malária



Linha C = Negativo

Não faça o tratamento contra a malária



Nenhuma linha ou apenas uma linha no nível da letra T = inválido
refazer o teste

Tome paracetamol se você tiver febre ou dores

CareStart™
Malaria


Single Kit

(Lab in a Pack)

Rapid Malaria Antigen Whole Blood Test Professional Use Only
Contents : Test Device, Procedure Card,
Assay Buffer Vial, Alcohol Pad, Lancet, Pipette

40°C
(104°F)
1°C
(34°F)

ACCESSBIO
www.accessbio.net

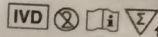

CareStart™
Malaria


Single Kit

(Lab in a Pack)

Rapid Malaria Antigen Whole Blood Test Professional Use Only
Contents : Test Device, Procedure Card,
Assay Buffer Vial, Alcohol Pad, Lancet, Pipette

40°C
(104°F)
1°C
(34°F)

ACCESSBIO
www.accessbio.net

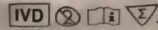

CareStart™
Malaria

Single Kit

(Lab in a Pack)

Rapid Malaria Antigen Whole Blood Test Professional Use Only
Contents : Test Device, Procedure Card,
Assay Buffer Vial, Alcohol Pad, Lancet, Pipette

40°C
(104°F)
1°C
(34°F)

ACCESSBIO
www.accessbio.net

